


OLIVE GOLD
KYSLÍKOVÝ KONCENTRÁTOR S BATERIÍ,
nabíječkou a pojízdným vozíkem
NÁVOD K POUŽITÍ

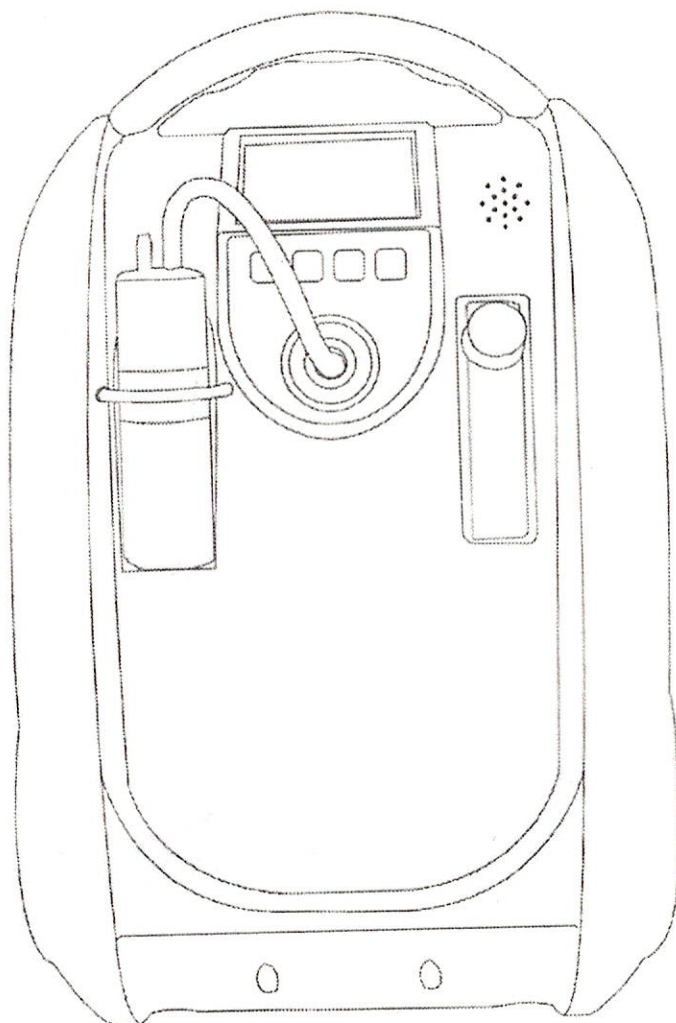

Obsah

1. Úvod	2
2. Důležité bezpečnostní pokyny	3
3. Spuštění	5
4. Ilustrace kyslíkového koncentrátoru	6
5. Jak provozovat kyslíkový koncentrátor	7
6. Údržba	9
7. Řešení problémů	10
8. Technické údaje	11
9. Omezená záruka	12

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek - kyslíkový koncentrátor 1LPM. Toto zařízení produkuje při jmenovitém zatížení 1 litr kyslíku za minutu o čistotě 90 %. Zařízení se zapojuje do standardní zásuvky a lze jej použít téměř kdekoli.

Tento návod vás seznámí s kyslíkovým koncentrátorem 1LPM. Pokud byste měli jakékoli dotazy, váš místní dodavatel zařízení vám na ně rád odpoví. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli všem informacím zde obsaženým před tím, než začnete přístroj používat.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických zařízení obzvláště za přítomnosti dětí je třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny zde uvedené. Důležité informace jsou zvýrazněny těmito slovy:



NEBEZPEČÍ

Bezpečnostní informace nejvyšší důležitosti týkající se nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění nebo smrt.



POZOR

Důležité bezpečnostní informace týkající se nebezpečí, která mohou způsobit vážná poranění.



OPATRNĚ

Informace určené k zabránění poškození zařízení.



POZNÁMKA

Informace, kterým byste měli věnovat obzvláštní pozornost.



NEBEZPEČÍ

Pro snížení nebezpečí vážného nebo smrtelného zranění v důsledku zásahu elektrickým proudem:

1. Nepoužívejte přístroj v okamžiku, kdy se koupete.
2. Neumisťujte přístroj tam, kde by na něj mohla stříkat voda, nebo kde by mohl spadnout do vany, vody nebo jiné tekutiny.
3. Jestliže přístroj spadne do vody, nevytahujte jej – odpojte jej ze zásuvky a následně odešlete dodavateli nebo do autorizovaného servisu pro provedení prohlídky a oprav.



POZOR

1. Zkontrolujte hodnoty napájení na štítku zařízení a místní síť před tím, než přístroj připojíte k síti.
2. Udržujte veškeré přívodní kabely mimo horké povrchy.
3. Nepoužívejte přístroj, jestliže:
 - přístroj spadl nebo utrpěl silný náraz,
 - byl přístroj postříkaný tekutinou,
 - došlo k poškození přívodního kabelu nebo zásuvky,
 - přístroj nefunguje správně.



POZOR

Tento přístroj vyvíjí velké množství kyslíku, který podporuje hoření. Zamezte kouření nebo přítomnosti otevřeného plamene v blízkosti menší než 1,5 m od (1) tohoto přístroje nebo (2) jakéhokoli zařízení přepravujícího kyslík. Nepoužívejte žádné oleje, maziva či ropné produkty na přístroji nebo v jeho blízkosti. Před tím, než zahájíte čištění nebo servis zařízení, jej odpojte ze zásuvky.



POZOR

Jestliže přístroj zapnete a nepoužíváte jej, nenechávejte náhlavní soupravu pod příkrývkou nebo polštářem. Díky kyslíku se tyto materiály stávají vysoce hořlavými. V okamžiku, kdy koncentrátor nepoužíváte, přepněte hlavní spínač do polohy vypnuto (off).



POZOR

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nesnímejte kryt! Pouze váš dodavatel přístroje nebo náš autorizovaný technik mohou kryt snímat.



POZOR

U tohoto přístroje nepoužívejte prodlužovací kabely. Nepřetěžujte zásuvky.



OPATRŇ

Nezakrývejte ventilační otvor na zadní straně přístroje.

Spuštění

1. Otevřete obal zařízení, zkontrolujte obsah a zkontrolujte, zda jsou přiloženy tyto součásti:

- A. Kyslíkový koncentrátor
- B. Náhlavní souprava
- C. Hadičky k náhlavní soupravě
- D. Vstupní filtr vzduchu
- E. Návod k použití
- F. Záruční list




Obr. 1

Pokud některé z těchto součástí chybí, kontaktujte dodavatele, od kterého jste kyslíkový koncentrátor 1LPM koupili.


- 2. Vyplňte kartu záručního listu a odešlete ji.
- 3. Doporučujeme mít neustále k dispozici jeden filtr krytu přístroje a vstupní filtr vzduchu navíc – hodí se to v případě, kdy dojde k zanesení filtrů a je třeba je vyměnit.

Kyslíkový koncentrátor 1LPM

1. Tlačítko ZAP/VYP O₂
2. Nastavení času +
3. Nastavení času -
4. Ionizátor ZAP/VYP
5. Diodový ukazatel
6. Ovladač průtoku
7. Průtokoměr
8. Držák zvlhčovače
9. Výstup kyslíku
10. Napájecí kabel
11. Kryt vstupu vzduchu
12. Vstupní filtr

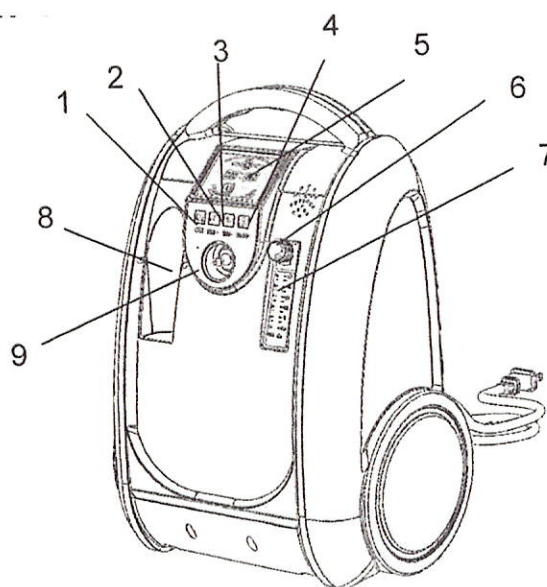

Obr. 2

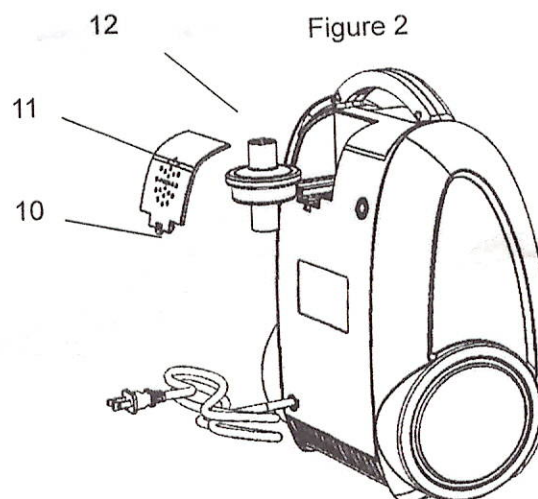

Obr. 3

Jak provozovat kyslíkový koncentrátor 1LPM

1. Seznamte se s přístrojem.
2. Umístěte zařízení na pevný rovný povrch, který je zároveň čistý a bez prachu.
3. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.




POZNÁMKA

Před tím, než provedete „studený“ start ve vytápěné místnosti, nechte přístroj v místnosti dostatečně dlouhou dobu, aby získal pokojovou teplotu.


4. Stiskněte tlačítko ZAP/VYP O₂.

Tlačítko ZAP/VYP O₂

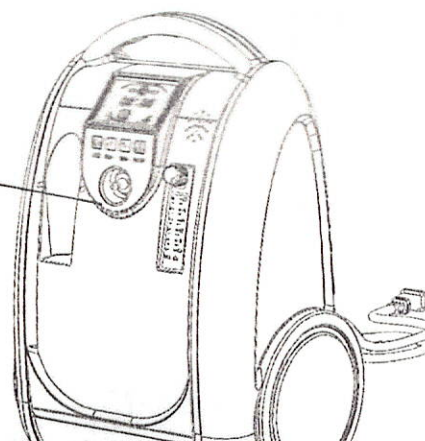


Obr. 4

5. Nastavte provozní čas pomocí tlačítka nastavení času + a – takto:
 - A. Stiskněte tlačítko nastavení času +, a tak zvýšíte provozní dobu.
 - B. Stiskněte tlačítko nastavení času -, a tak provedete první snížení o 30 minut.
 - C. Pokud tato tlačítka nepoužijete – zařízení poběží v nepřetržitém provozu.
 - D. Stisknutím tlačítka ionizátoru spustíte ionizátor.

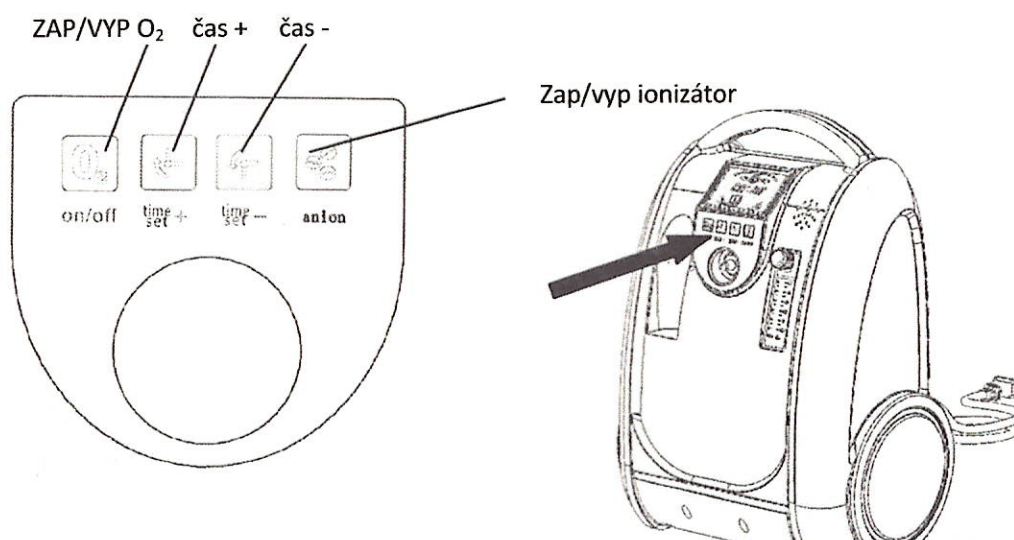

Obr. 5

6. Připojte trubičku náhlavní soupravy k výstupu kyslíku přístroje.

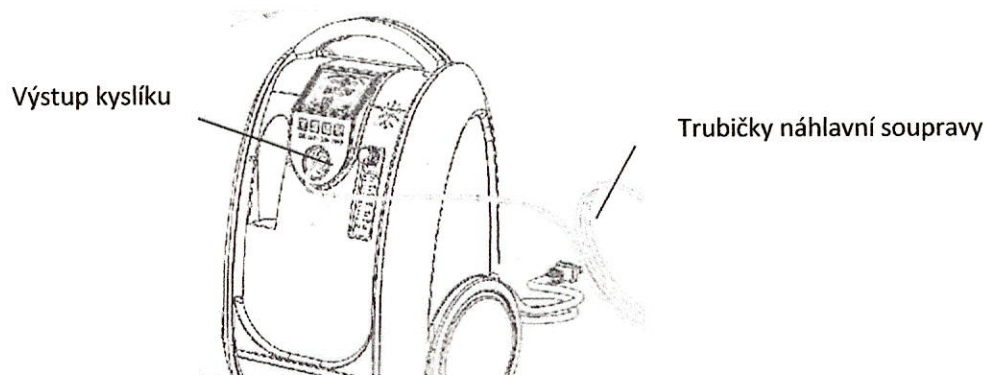

Obr. 6

7. Nasadte náhlavní soupravu na ucho a nastavte ji do správné pozice.
8. Při nastavení času provozu se zařízení po uplynutí dané doby automaticky zastaví.
9. Pokud, chcete přístroj opět spustit, opakujte kroky 4 a 5.
10. Pokud přístroj nebudete delší dobu užívat, vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Údržba



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nesnímejte kryt zařízení. Pokud je potřeba provést servisní činnosti, zašlete přístroj kvalifikovanému dodavateli nebo do autorizovaného servisního střediska. Otevřením přístroje nebo prováděním nedovolené manipulace dojde ke zrušení záruky na výrobek.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


Před tím, než začnete provádět údržbu, vytáhněte kabel ze zásuvky

Vyčištění vnějšího obalu

1. Odpojte přístroj od veškerého externího napájení.
2. Otřete vnější povrch čistým hadříkem a běžnou dezinfekcí (germicidním přípravkem).

Výměna vstupního filtru

1. Odpojte přístroj od veškerého externího napájení.
2. Otevřete kryt vstupu vzduchu.
3. Vyjměte vzduchový filtr.
4. Vložte nový vzduchový filtr.
5. Opětovně osadte kryt vstupního filtru.
6. Vstupní filtr měňte jednou za půl roku.

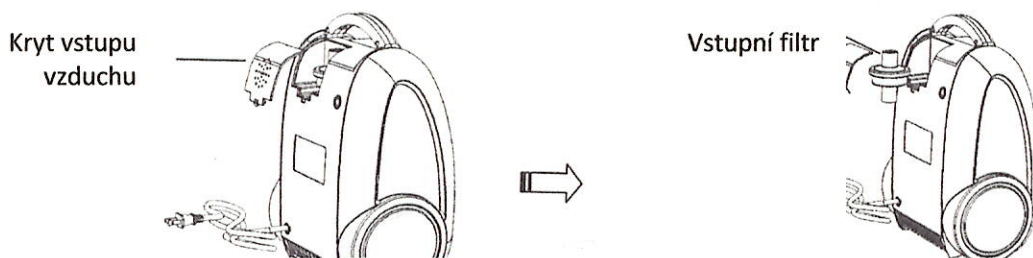

Obr. 7

Řešení problémů

Váš kyslíkový koncentrátor neobsahuje žádné části, u kterých byste mohli sami provádět servis. Jestliže se domníváte, že váš přístroj nefunguje správně, prosím proveďte kontrolu těchto možných příčin před tím, **NEŽ PŘÍSTROJ VRÁTÍTE PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZÍSKALI:**

PROBLÉM	ČINNOST
Jednotka se nezapíná.	1. Zkontrolujte zdroje napětí a zapojení. 2. Zkontrolujte, zda je zásuvka funkční. 3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození kabelu.
Motor běží – přístroj neprodukuje kyslík.	Zkontrolujte zapojení všech hadiček.
Omezený průtok kyslíku.	1. Zkontrolujte, zda nejsou hadičky poškozené nebo přehnuté. 2. Zkontrolujte napětí zásuvky.
Je spuštěn alarm	1. Přesuňte přístroj na dobře větrané místo.

Technické údaje přístroje 1LPM

Hmotnost:	5,4 kg
Rozměry (DxŠxV):	260x195x387 mm
Požadavky na napájení:	AC 230 V/50 Hz
Příkon:	90 W při běžném zatížení
Čistota kyslíku:	40 % ± 3 % při 5 L, 60 % ± 3 % při 3 L, 90 % ± 3 % při 1 L

Provozní podmínky

Teplota vzduchu:	50 až 95 °F (10 až 35 °C)
Vlhkost vzduchu:	30 až 75 %

Přeprava/skladování

Okolní teplota:	-13 až +158 °F (-25 až +70 °C)
Vlhkost vzduchu:	10 až 90 %

Záruka

Jednoroční záruka s omezením

Je poskytována jednoroční záruka od data nákupu na vady provedení a materiálů kompresorové části kyslíkového koncentrátoru 1LPM.

Jakékoli vadné díly budou opraveny nebo vyměněny podle volby XXXXXXXX, jestliže nedošlo k neoprávněné manipulaci s přístrojem nebo nebyl přístroj nesprávně používán v rámci této záruční lhůty. Zajistěte, aby k poruše nedošlo v důsledku nesprávného čištění nebo nedodržení pokynů. V případě, že je potřeba provést opravu, kontaktujte prodejce/dodavatele přístroje pro získání dalších pokynů.



POZNÁMKA

Tato záruka nepokrývá zajištění náhradního přístroje, pokrytí nákladů vzniklých pronajímáním jiného přístroje v průběhu opravy daného přístroje, nebo náklady na práci vzniklé při opravě nebo výměně vadných dílů.

ŽÁDNÁ JINÁ ZÁRUKA NENÍ POSKYTOVÁNA. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU OMEZENY NA DOBU VÝSLOVNÉ ZÁRUKY S OMEZENÍM A ROZSAHEM POVOLENÝM ZE ZÁKONA A VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JSOU VYLOUČENY. TOTO JE JEDINÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK A ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY A VEDLEJŠÍ ŠKODY DLE JAKÝCHKOLI ZÁRUK JE VYLOUČENA V ROZSAHU V JAKÉM VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI POVOLUJE ZÁKON. NĚKTERÉ STÁTY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ DÉLKY ZÁRUKY NEBO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NÁHRAD NÁSLEDNÝCH NEBO VEDLEJŠÍCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT.

Tato záruka vám dává konkrétní zákonná práva; také můžete disponovat i jinými právy, která se mohou měnit stát od státu.

* U DĚTÍ MLADŠÍCH PĚTI LET JE TŘEBA POUŽITÍ KYSLÍKOVÉHO KONCENTRÁTORU 1LPM NEJDŘÍVE KONZULTOVAT S LÉKAŘEM.

* MAXIMÁLNÍ DÉLKA POUŽITÍ PŘÍSTROJE PRO JAKOUKOLI OSOBU JAKÉHOKOLI STÁŘÍ NESMÍ PŘEKROČIT DVĚ HODINY DENNĚ.

Poznámka výrobce

Děkujeme, že jste si vybrali kyslíkový koncentrátor 1LPM. Máme zájem na tom, abyste byli s výrobkem spokojeni. Jestliže máte jakékoli dotazy nebo připomínky, pošlete je prosím na adresu uvedenou na zadním přebalu.

V případě, že byste potřebovali servisní služby, kontaktujte svého autorizovaného poskytovatele přístroje 1LPM:

Tel.:

Datum koupě:

Výrobní č.:

Dovoz a distribuci,

Servis a BTK dle zákona 268/2014 Sb. zajišťuje:

KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o.

Přemyslova 25

301 00 PLZEŇ

www.SZO.cz

Telefon: 377 424 999

Návod pro baterii OLV-B1

Technické údaje:

Vstupní napětí: 100V-240V/50Hz/60Hz
Kapacita: 7800 mAh
Hmotnost: 0,8 kg
Teplota uskladnění: 0 - 50°

Výstupní napětí: 14,8 V
Spotřeba energie: 118 W
Rozměry (DxŠ): 15,5x8,5 cm
Provozní teplota: 10 - 40°

Jak baterii používat:

1. Připojte baterii k automobilovému měniči napětí (obr. 10).




Obr. 10

2. Zapojte přístroj do měniče.
 3. Baterie vydrží 61 – 120 minut při plném nabití.
- Tipy: (1) Baterii lze použít pro dobíjení mobilního telefonu. Také ji lze použít jako domácí záložní baterii pro napájení venkovního světla.
(2) Baterii lze dobít při jízdě automobilem – připojte měnič ke světlu auta jako domácí síti.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku k baterii podle obr. 11.

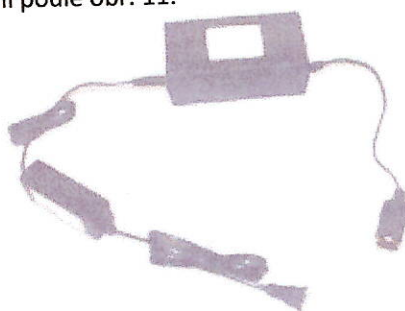

Obr. 11

2. Plné nabití baterie trvá 5 až 6 hodin.
3. Při nabíjení svítí červená dioda. Vypnutí je značeno zelenou diodou.

Použití doma nebo v autě

1. Při použití doma připojte elektrický kód přímo do sítě.
2. Při použití v autě, připojte měnič ke stroji a ke světlům.